

## Werkwijze insturen van materiaal

### A

#### **abortus**

Het abortusweefsel in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

#### **ascitesvocht**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

#### **appendix**

De appendix in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

#### **arteria temporalis**

Het biopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

#### **aspiraats:**

Het aspiraats in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

#### **amputatie**

Het lichaamsdeel goed verpakt in celstof met daaromheen een plastic zak, op de dag van amputatie insturen.

### B

#### **baarmoederhalsuitstrijk**

Neem voldoende materiaal uit de baarmoederhals met een Cervex-brush. Plaats het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de andere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Druk zachtjes en draai de borstel 5 keer rond met de klok mee. Spoel de Cervex-Brush meteen in het potje met PreservCyt oplossing (thinprep potje) door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken.

#### **BAL- onderzoek (broncho- alveolaire lavage)**

Het materiaal vers insturen

#### **beenmerg**

Het materiaal 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

#### **bijschildklieren**

Bijschildklier in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

#### **blaasbiopten / T.U.R. blaas**

De blaasbiopten of het endoresectie materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen en.

**blaas (cystectomie)**

De blaas op de dag van verwijdering in 10% gebufferde fosfaat formaline insturen.

**blaasspoeling**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**botboringen**

De botboring in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**botbiopt**

De botboring in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**bronchiale borstelpreparaten**

Twee ongefixeerde uitstrijken insturen.

**bronchiaal secreet**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**brush oesophagus**

Van het borstel preparaat minimaal één en indien mogelijk twee ongefixeerde uitstrijken insturen. Zijn er meer uitstrijken, dan deze eveneens ongefixeerd insturen.

**C****cervixbiopt**

Het cervixbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**cervixpoliep**

Het cervixpoliep in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**cervix brush**

Neem voldoende materiaal uit de baarmoederhals met een Cervex-Brush. Plaats het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de andere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Druk zachtjes en draai de borstel 5 keer rond met de klok mee. Spoel de Cervex-Brush meteen uit het potje met PreservCyt oplossing door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken waardoor de borstelhaartjes uit elkaar komen te staan. Draai het borsteltje tenslotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Controleer de Cervex-Brush visueel om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven. Gooi het afnameborsteltje weg. Laat de kop van de Cervex-Brush niet achter in het potje! Draai het dopje er zodanig op dat de zwarte markeringslijn op het dopje de zwarte markeringslijn op het dopje passeert. Het dopje niet te hard aandraaien.

**colonbiopt**

Het colonbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**conusexcisie**

De conusexcisie in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**cystevocht**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**D****darm**

De darm op de dag van verwijdering meteen inzenden in 10% gebufferde fosfaat formaline insturen.

**dieren materiaal voor histologie**

Stuur het materiaal op in 10% gebufferde formaline van merk Fisherbrand. Liefst geschoren huid laesies opsturen.

**dieren materiaal uitstrijk van dunne naald (aspiratie) biopten.**

Meerdere uitstrijken in te sturen (ongefixeerd). Strijk aspiraties op gecoate glaasjes (superfrost).

**E****Eileider (Tuba)**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**endometrium(aspiratie)biopt**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**endometriumcurettag**

De curettage in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**endometriumpoliep**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**excisiebiopten en incisiebiopten**

Biopten in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**F****foetus**

Foetus jonger dan 24 weken: in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen foetus vanaf 24 weken: insturen met een obductie aanvraag; rechtstreeks naar het mortuarium.

## G

### **galblaas**

De galblaas in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

## H

### **halsklierdissectie**

De halsklierdissectie direct na verwijdering vers in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **hersentumor**

Het hersenmateriaal direct vers insturen op fysiologisch zout. Als dit niet mogelijk is dan insturen op 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **heupkop**

De heupkop in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **huidbiopt**

Het huidbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **huidbiopt tbv van IF**

In overleg met PA lab, biopt op Michel's Buffer opsturen op maandag of woensdag.

### **huidexcisie**

De huidexcisie in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **hypofyse**

Het weefsel direct vers insturen op fysiologisch zout. Als direct inzenden niet mogelijk is dan moet het weefsel in 10 % gebufferde formaline fosfaat worden ingestuurd. Als een vriescoupe gewenst is het weefsel vers/droog insturen na overleg met het PA-lab. Wanneer geen vriescoupe is gewenst het weefsel direct vers insturen op fysiologisch zout.

## K

### **knievocht**

Het materiaal vers insturen.

## L

### **leverbiopt**

Leverbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **lipbiopt**

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**liquor**

Het materiaal vers insturen. Tijd van afname noteren. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Direct na afname insturen. Buitenkantooruren bellen voor het insturen van het materiaal! Materiaal moet direct na afname binnen 1 uur verwerkt worden!

**lisexcisie**

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**long**

De long in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**longbiopt**

Longbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**lymfklier**

De lymfklier op 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**M****maagbiopt**

Maagbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**mamma (lump, ablatio, reductie)**

Mammapreparaat in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**mamma trucut biopt**

Het mammabiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**mediastinum biopt**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**milt**

De milt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**myomectomie**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**N****nagel**

De nagel in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**neusslijmvliesbiopt / neuspoliep**

Het biopt of de poliep(en) in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**nier**

De nier in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**nier biopt met vraagstelling maligniteit**

Het nier biopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**O****oesophagusbiopt**

Oesophagusbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**okselklier**

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**oog**

Na verwijdering het oog fixeren in 10 % gebufferde fosfaat formaline. Het oog niet insnijden.

**ovarium**

Het ovarium op de dag van verwijdering insturen in 10 % gebufferde fosfaat formaline.

**ovariumcystevocht**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**P****pancreasbiopt**

Het pancreasbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**pericardvocht**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**phaechromocytoom (PCC) / neuro-endocriene tumor**

Materiaal insturen in 10 % gebufferde fosfaat formaline.

**placenta**

De placenta insturen in 10 % gebufferde fosfaat formaline. Gelieve de placenta voor fixatie spoelen met leidingwater.

**pleuravocht**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**prostaat**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**prostaatbiopt/T.U.R.- prostaat**

Het prostaatbiopt of het endoresectie materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**punctie (cytologische orgaanpunctie)**

Van de punctie twee ongefixeerde uitstrijken

**S****sarcoom/weke delen**

Het weefsel in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**schildklier**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**schildklierpunctie**

Van de punctie twee ongefixeerde uitstrijken Rest materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline de naald spoelen en insturen op de brief vermelden. Er kan verzoek gedaan worden op de afdeling pathologie voor een ROSE (rapid on sight evaluation).

**slijmvliesbiopt**

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**speekselklier**

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**spierbiopt**

Het spierbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**sputum**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.

Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**synoviaal vocht**

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

**T****testis**

De testis in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

**testisbiopt**

Testisbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

## U

### **uitstrijken**

Uitstrijken dienen op objectglazen met mat rand gelijkmatig en vloeiend uitgestreken te worden. Noteer met potlood naam, geboortedatum en eventuele onderverdeling en **FIX** als het materiaal gefixeerd is op de mat rand van het objectglas. Indien het materiaal gefixeerd moet worden spray deze direct met het fixatief. De uitstrijken worden verzonden in de daarvoor bestemde blauwe plastic preparatenhoesjes.

### **ureterbiopt**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **urineblaas**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **urine**

Het materiaal vers insturen in een steriele container, pot of buis. **Geen directe ochtendurine insturen maar de tweede portie 'gewassen' ochtendurine.** In geval van katheterurine dit op het aanvraagformulier duidelijk vermelden. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Stuur de urine op de dag van afname zo snel mogelijk in. Op aanvraagformulier vermelden of urine spontaan, catheter of via "washout" is verkregen.

### **uterus**

De uterus in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

## V

### **vulva**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

## Z

### **zenuw**

De zenuw in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

### **zaadleider (vas deferens)**

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.